

广告批准文号

# VITA SUPRINITY<sup>®</sup> 齿科陶瓷

## 产品信息



VITA 临床比色

VITA 色彩沟通

VITA 色彩再现



VITA 色彩控制

# VITA

VITA SUPRINITY 齿科陶瓷  
VITA SUPRINITY 齿科陶瓷抛光套装  
VITA AKZENT Plus 外染套装

\* 禁忌内容或注意事项详见说明书

## VITA SUPRINITY® – 齿科陶瓷

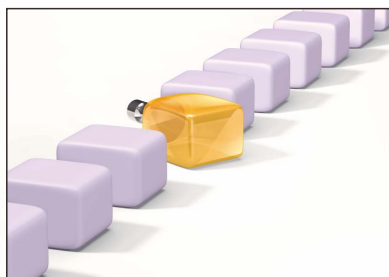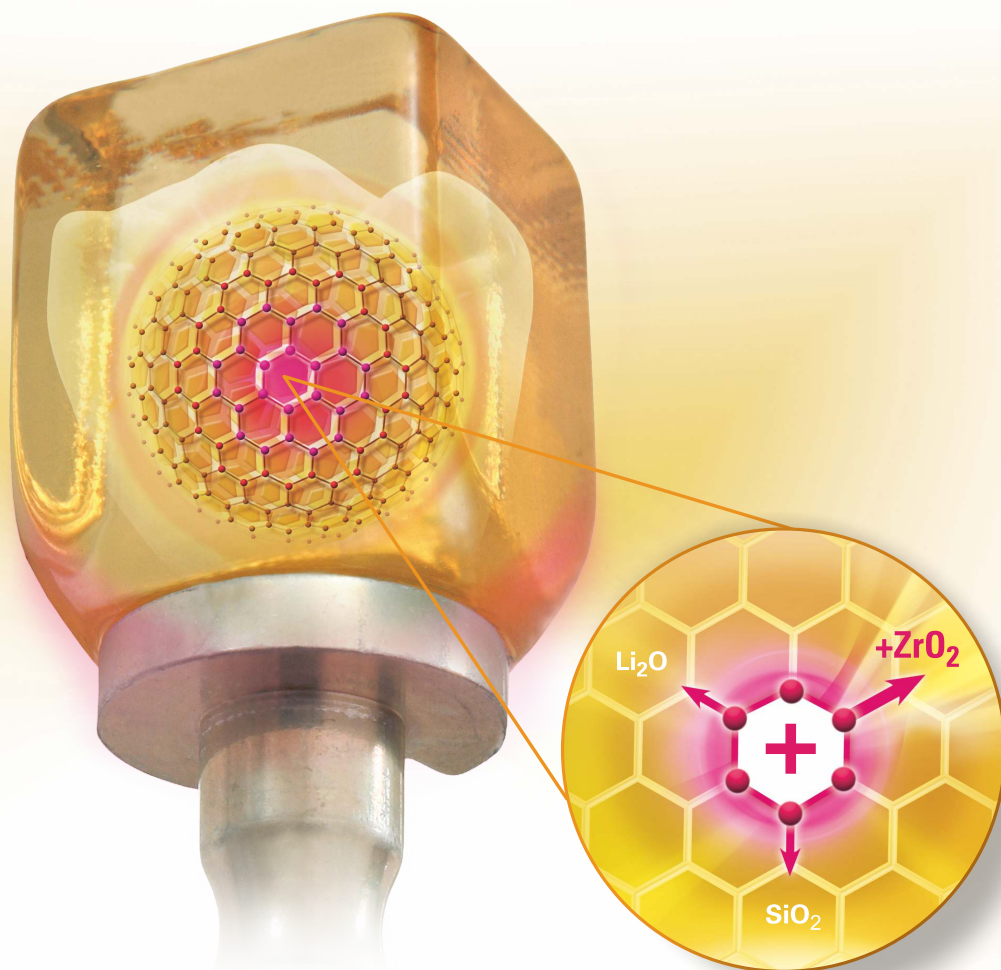

新型玻璃陶瓷材料：VITA SUPRINITY齿科陶瓷


### 产品概述

VITA SUPRINITY齿科陶瓷是VITA Zahnfabrik（维他公司）研发的一款玻璃陶瓷产品。玻璃陶瓷中含有氧化锆成份，形成氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷（ZLS）\*。

这种新型玻璃陶瓷具有细致及均匀的内部结构，因此其负载能力较佳且长期稳定性良好。该材料还具有良好的研磨和抛光性能。

这种新型玻璃陶瓷还具有良好的透明性、荧光性及乳光效果，因此VITA SUPRINITY齿科陶瓷不仅可用于美学方面，同时还有广泛的适应症范围：包括嵌体、高嵌体、部分冠、贴面和前后牙单冠以及单个种植体上部修复体。

## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 产品优势

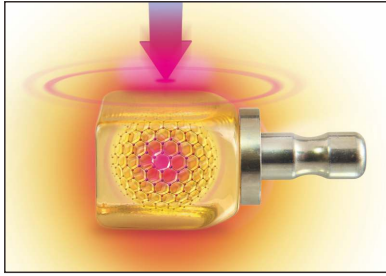

新型玻璃陶瓷材料具有较好的负载能力

### 负载能力：

VITA SUPRINITY齿科陶瓷具有较好的机械负载能力，可使材料具有较高的可信性和长期的使用率。



氧化锆成分的加入，增加了玻璃陶瓷材料的牢靠性

### 杰出的持久性：

连续负载测试后结果和韦伯尔模量的数据可表明，VITA SUPRINITY齿科陶瓷材料使义齿具有良好的持久性。




加工简单

### 易控的加工过程：

VITA SUPRINITY齿科陶瓷具有很高的热稳定性，在结晶烧结的过程中不需要使用其它辅助材料。另外，对该材料进行修改和抛光也快捷简单，抛光后的材料表面也较为光滑。

## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 产品优势

顶部视图，30°角：  
VITA SUPRINITY齿科陶瓷，200倍放大率

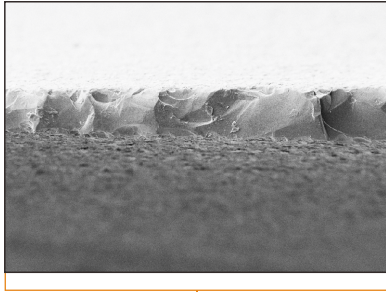

图片资料由VITA R&D（维他研究与开发部）提供



### 精度：

在使用西诺德的MCXL（研磨设备）加工系统进行研磨后，VITA SUPRINITY齿科陶瓷边缘稳定度表现更佳，这使义齿具有较高的精密度。



操作简单：研磨，烧结和处理

### 制造工艺

VITA SUPRINITY齿科陶瓷具有较高的制造工艺，因此在结晶烧结过程中，温度稍低或稍高都不会对材料的尺寸稳定性和机械性能造成重大影响。



VITA SUPRINITY齿科陶瓷具有杰出的美学效果

### 杰出的美学效果：

VITA SUPRINITY齿科陶瓷具有良好的透明性、荧光性及乳光效果，具有杰出的美学效果。

## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 适应症, 种类, 颜色



理想的适应症范围

### 适应症范围:

VITA SUPRINITY齿科陶瓷适应症广泛, 可用于嵌体、高嵌体、部分冠、贴面和前后牙单冠以及单个种植体上部修复体。

### 种类:

VITA SUPRINITY齿科陶瓷是一种氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷。

### 可选颜色:

VITA SUPRINITY齿科陶瓷的可选颜色: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 和 D2。另外, 每个颜色还分两种透明度可供选择 (T = 透明和HT = 高透)。



## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 抛光套装 (口腔诊室用 /技工用)



### 产品概述

VITA SUPRINITY齿科陶瓷抛光套装，专用于氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷材料（ZLS）义齿的表面处理，口腔诊室用和技工用两种。套装中包含预抛光和高亮抛光两类车针。



这种打磨车针适用于义齿咬殆面、牙尖、裂隙及接触区的细致抛光，可使抛光后的义齿表面呈现出璀璨的光泽。



简单、快捷、表面光亮

### 产品特点

#### 杰出的抛光效果：

使用抛光套装后，义齿表面美观光亮且不易有牙菌斑附着。该车针有准确的同心度、匹配的颗粒尺寸并且设计成多种形态以方便抛光操作。

#### 操作简单、安全：

该车针对义齿预抛光时，可对其微量修形。对义齿最终抛光时不需要使用抛光膏，操作简单快捷。该器具经过灭菌处理，可安全用于抛光。

#### 柔和细腻的打磨：

这种车针针对VITA SUPRINITY齿科陶瓷的抛光而设计，其打磨过程柔和细腻，因此，降低了材料表面产生微裂纹的几率。

## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 使用VITA AKZENT® Plus

### 产品概述

VITA AKZENT Plus染色材料共有19个颜色，它可以用于牙科陶瓷材料的表面染色，简单易控。这种荧光染色粉既可以用于义齿的内染色，也可以用于外染色。

由于操作者的习惯和应用范围的不同，VITA AKZENT Plus有多种产品规格可供选择：染色材料分为粉剂和膏剂（预调和的）两种，底色调整剂和上釉材料还配有喷雾型包装。

三种产品类型可供选择：

#### 粉剂：


无保质期限值，经济效益高。

#### 膏剂：

可直接使用，膏剂的质地和颜色均匀一致。

#### 喷雾：

可直接使用，使上釉剂操作简单。

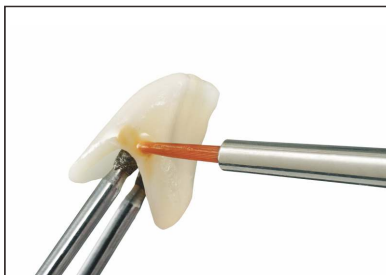

染色材料体现了颜色的个性特征

### 产品特点

#### 产品丰富：

VITA AKZENT Plus有19种颜色和3种釉剂产品类型可供选择，为口腔诊室和技工室的个性化染色上釉操作，提供整套的方案。

#### 操作简单：

无论是内部染色、个性化外染色还是上釉，使用VITA AKZENT Plus的荧光染色剂，都可以轻易获得修饰义齿的效果。

#### 经济效益：

VITA AKZENT Plus不仅可以对VITA SUPRINITY齿科陶瓷义齿进行染色修饰，也同样适用于其他牙科陶瓷材料的染色修饰。

## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 材料配置表

### VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 用于CEREC®/inLab® 系统

VITA SYSTEM 3D-MASTER 色和16色

#### VITA SUPRINITY 高透瓷块

颜色	包装	产品编号
0M1-HT	5 块	EC4S010101
A1-HT	5 块	EC4S010130
A2-HT	5 块	EC4S010131
A3-HT	5 块	EC4S010132
A3.5-HT	5 块	EC4S010133
B2-HT	5 块	EC4S010136
C2-HT	5 块	EC4S010140
D2-HT	5 块	EC4S010143

#### VITA SUPRINITY 透明瓷块

颜色	包装	产品编号
0M1-T	5 块	EC4S010001
A1-T	5 块	EC4S010030
A2-T	5 块	EC4S010031
A3-T	5 块	EC4S010032
A3.5-T	5 块	EC4S010033
B2-T	5 块	EC4S010036
C2-T	5 块	EC4S010040
D2-T	5 块	EC4S010043

#### 系统兼容性:

VITA SUPRINITY齿科陶瓷可使用西诺德CEREC（临床系统）或inLab MC XL（技工室MC XL系统）加工，软件版本：4.2及以上。其他版本的西诺德研磨设备（口腔诊室或技工室用），在选择加工材料时选择二硅酸锂玻璃陶瓷选项。

### VITA SUPRINITY® 抛光套装口腔诊室用/技工用

#### 分类

产品	产品描述	含量/支	产品编号
VITA SUPRINITY抛光套装（口腔诊室用）	2步抛光：预抛光和高亮抛光，用于高速手机	6	ELSPSETC
VITA SUPRINITY抛光套装（技工用）	2步抛光：预抛光和高亮抛光，用于技工室打磨机	8	ELSPSETT



# VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 使用Akzent plus材料配置表

VITA AKZENT®Plus

## AKZENT Plus颜色

产品	颜色	色号	可选包装		
			喷雾	粉剂	膏剂
<b>底色调整剂</b> · 透明染色釉剂 · 用于基底材料的颜色调整	黄色	BS 01	☑	☑	☑
	黄棕色	BS 02			
	橙色	BS 03			
	橄榄灰色	BS 04			
	灰褐色	BS 05			
<b>效果染色剂</b> · 营造表面颜色效果	白色	ES 01	-	☑	☑
	奶白色	ES 02			
	柠檬黄	ES 03			
	日光黄	ES 04			
	橙色	ES 05			
	黄褐色	ES 06			
	卡其色	ES 07			
	粉色	ES 08			
	暗红色	ES 09			
	浅紫色	ES 10			
	蓝色	ES 11			
	灰蓝色	ES 12			
	灰色	ES 13			
	黑色	ES 14			

## VITA SUPRINITY® 齿科陶瓷 使用Akzent plus材料配置表

### VITA AKZENT®Plus配置单

#### VITA AKZENT Plus粉剂套装 (产品编号. No. BAPK)

数量	规格	材料
14	3 g	底色调整粉, ES01-ES14
5	3 g	效果染色粉, BS01-BS05
1	5 g	釉粉
1	5 g	低温釉粉
1	5 g	颗粒度较细腻的釉粉
1	20 ml	粉剂专用液
1	个	调色盘含比色盘
		其他
		操作说明

#### VITA AKZENT Plus膏剂套装 (产品编号. No. BAPKP)


数量	规格	材料
14	4 g	底色调整膏, ES01-ES14
5	4 g	效果染色膏, BS01-BS05
1	4 g	釉膏
1	4 g	低温釉膏
1	4 g	颗粒度较细腻的釉膏
1	15 ml	膏剂专用液
1	个	比色盘
1	个	调拌板, 玻璃棒 (70 x 95mm)
		其他
		操作说明

#### VITA AKZENT Plus喷雾套装 (产品编号. No. BAPKS)

数量	规格	材料
5	75 ml	底色调整喷雾, BS01-BS05
1	75 ml	上釉喷雾
1	个	比色盘
		操作说明



VITA SYSTEM 3D-MASTER 比色系统，可以有系统地测定和复制天然牙色。

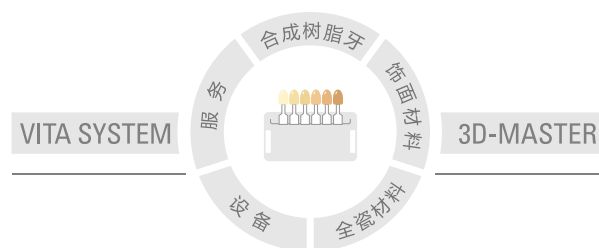

敬请注意：

产品请按操作说明进行操作。否则，恕不承担由此所造成的一切损失。用户在使用本产品前有义务对其应用范围进行进一步确认。如果未按使用要求将本产品与其他材料混合使用，或用其他厂商的仪器进行加工，由此而造成的不适症及损伤，本公司不负任何责任。

对本说明的准确性，我公司所承担的法律責任仅限于改产品本身的价值（见供货单上产品的价格，不包括消费税）。公司不承担由使用本产品而造成的营业额的损失，以及其他直接或间接的损失，以及第三者对买方所提出的赔偿。本公司没有责任承担因为故意或严重过失（包括签订协议时的过失、触犯与协议相关的义务、违规运作等过失）所造成的损失。

**tesco** | DENTAL  
SUPPLIES  
LIMITED

**上海瓷丰牙科器材贸易有限公司**

地址：上海市普陀区陕西北路1438号  
财富时代大厦9楼901室

电话：(21) 6276 0777

传真：(21) 5426 2889

客服电话

**400-188-3831**

**VITA**

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG 公司

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany 德国

电话：+49(0)7761/562-0 传真：+49(0)7761/562-299

热线：+49(0)7761/562-222 传真：+49(0)7761/562-446