

VITA AKZENT® Plus

产品信息



VITA 临床比色

VITA 色彩沟通

VITA 色彩再现

VITA 色彩控制

VITA shade, VITA made.

VITA

不受热膨胀系数影响的外染色材料。

可完成染色上釉工序。

提供粉剂，糊剂及喷雾型套装。

VITA AKZENT® Plus 优化、简单、全能



技师拥有更大的选择性和自由度

你是否在寻找一种更为简单有效的染色上釉的方法？ VITA AKZENT Plus 系列产品正是你的不二之选。

在该产品系列中包含了釉染、遮染、上釉等材料，给予你实际工作中极大的自由度和选择性。

该产品适用于市场上所有品牌的陶瓷材料，与所有材料的CTE相容。

新颜色、新应用、新适应症----- VITA AKZENT Plus是你的贴心好帮手。

无论是粉剂、糊剂、喷剂，你可以随心选用你最得心应手的款型，工作效率将会更上一层。

VITA AKZENT® Plus 喷雾型



AKZENT Plus SPRAY KIT 喷雾套装

数量	内容	材料
5	75 ml	基色调整喷雾, BS01-BS05
1	75 ml	上釉喷雾
1	75 ml	低温上釉喷雾
1		颜色样板
1		印刷品



VITA AKZENT Plus 喷雾型

- 喷雾染色剂操作方法非常简单。
- 适用于大面积喷涂，尤其是长桥修复体。
- 由于喷头的特殊设计，染色时容易操作并且能有效地控制喷涂过程。
- 因此，染色材料能均匀地喷涂在修复体表面。



VITA AKZENT® Plus 粉剂



AKZENT Plus SPRAY KIT 粉剂套装

数量	内容	材料
14	3g	效果染色粉剂, ES01-ES14
5	3g	基色调整粉剂, BS01-BS05
1	5g	釉粉
1	5g	低温釉粉
1	5g	超细釉粉
1	20 ml	粉剂专用液
1		调色盘含颜色样板
1		玻璃调拌刀
1		量匙 (0.1ml)
1		毛笔 No. 3/0
1		印刷品



VITA AKZENT Plus BODY STAINS 基色调整粉剂

- 通过专用液的用量来调整染色粉稀稠度。
- VITA AKZENT Plus粉剂与瓷粉可以混合调配（染色粉 \leq 5%），以增加色彩饱和度。
- VITA AKZENT Plus材料中，不同颜色染色粉可以互相混合调配。
- 粉剂材料无保质期限制,可以最大限度节约成本。



VITA AKZENT® Plus PASTE 膏剂



AKZENT Plus SPRAY KIT 糊剂套装

数量	内容	材料
14	4g	效果染色糊剂, ES01-ES14
5	4g	基色调整糊剂, BS01-BS05
1	4g	上釉糊剂
1	4g	低温上釉糊剂
1	4g	超细上釉糊剂
1	15 ml	糊剂专用液
1		颜色样板
1		玻璃调色板
1		玻璃调拌刀
1		扁头毛笔
1		毛笔 No. 3/0
1		印刷品



VITA AKZENT Plus 基色调整糊剂

- 预先调好的染色糊剂，始终如一的粘稠度和均匀的色调。
- 其特有的触变性确保材料操作简单并且易控。
- 不同颜色糊剂之间，可以混合调配得到个性化色彩。
- 染色糊剂在首次使用之前请充分调匀。
- 如糊剂变干，可以添加糊剂专用液，重新调拌至初始稠度。



VITA AKZENT Plus 糊剂专用液

- 用于调拌已经干涸或即将干涸的糊剂，并不会改变糊剂的物理特性。



AKZENT Plus 色彩选择 产品线						
产品	颜色 样本	颜色	标号	可以做		
				喷雾	粉剂	膏剂
基色调整剂 - 半透明的染色材料，在基地材料表面起到薄层滤色器的作用。 - 用于基色的调整		黄色	BS01			
		黄棕色	BS02			
		橙色	BS03			
		橄榄灰色	BS04			
		灰褐色	BS05			
效果染色剂 - 高饱和度, 并可遮色的染色材料。 - 再现个性化颜色, 并能与天然牙个性化色彩相匹配。 - 如表面涂覆很厚的一层染色剂, 可以完全遮盖修复体的基色。		白色	ES01			
		奶白色	ES02			
		柠檬黄	ES03			
		日光黄	ES04			
		橙色	ES05			
		黄褐色	ES06			
		卡其色	ES07			
		粉色	ES08			
		暗红色	ES09			
		浅紫色	ES10			
		蓝色	ES11			
		灰蓝色	ES12			
		灰色	ES13			
		黑色	ES14			
上釉剂 - 上釉焙烧后, 修复体表面透明亮, 均匀致密。						
低温釉剂 - LT = 低温焙烧 - 低温上釉材料特别适用于焙烧温度低于800°C的瓷粉。						
超细釉剂 - 用于表现丝感表面。						




全瓷贴面



全解剖一体式修复体



金属-烤瓷贴面

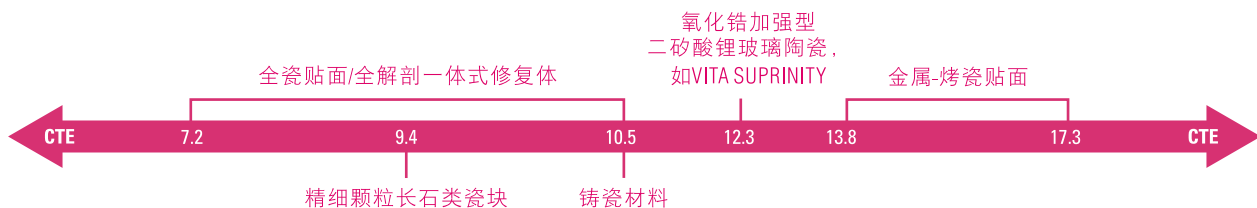

精细颗粒长石类瓷块



铸瓷材料

其他多项功能

釉染

目前包括整体染色粉 (BS)，它独有的材料通透性可以成功起到薄层调色的作用。

用于以下处理十分理想：

- 表层着色
- 调整修复体基色

遮染

超细颗粒材质，包括各种染色粉 (ES)，这些染色粉可以用于：

- 颜色的加深
- 颜色覆盖

它们非常适用于自然牙色的个性化外染和内染。

上釉


起到最终光亮表层的作用：

- VITA AKZENT Plus GLAZE--均匀覆盖整个修复体表面，赋予表面闪亮光泽度。
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT --低温釉剂，用于烧结温度800°C 的瓷材。
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT--用于表现丝感表面。

处理过程更为便捷

所有染色材料都具有荧光效应、极细的颗粒度和稳定的染色效果。粉液混合和糊剂的流动触变性也完全符合应用时的要求。

独一无二的VITA 3D MASTER比色系统，可以有系统地测定和完美地复制天然牙色。

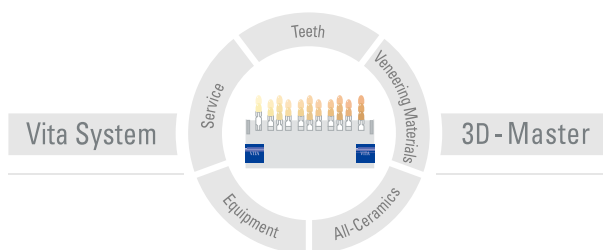

敬请注意：

产品请按操作说明进行操作。否则，恕不承担由此所造成的一切损失。用户在使用本产品前有义务对其应用范围进行进一步确认。如果未按使用要求将本产品与其他材料混合使用，或用其他厂商的仪器进行加工，由此而造成的不适症及损伤，本公司不负任何责任。

对本说明的准确性，我公司所承担的法律責任仅限于该产品本身的价值（见供货单上产品的价格，不包括消费税）。公司不承担由使用本产品而造成的营业额的损失，以及其他直接或间接的损失，以及第三者对买方所提出的赔偿。本公司没有责任承担因为故意或严重过失（包括签订协议时的过失、触犯与协议相关的义务、违规运作等过失）所造成的损失。

VITA Zahnfabrik已获得医药设备产品认证，以下各产品也已获得CE认证：CE 0124。

the following products bear the CE mark CE 0124 :

VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

90 years VITA

tesco 丰达 | DENTAL SUPPLIES LIMITED

香港总公司 (HongKong)
丰达牙科器材 (香港) 有限公司
地址：香港九龙永康街79号创汇
国际中心15楼D-F室
电话：(852) 2544 2729
传真：(852) 2854 1582
<http://cn.tesco-dental.com>

上海分公司 (Shanghai)
电话：(21) 6276 0777
传真：(21) 5426 2889

深圳分公司 (Shenzhen)
电话：(755) 2675 6440
传真：(755) 2675 5775

北京分公司 (Beijing)
电话：(10) 5377 9640
传真：(10) 5377 9642

