

# 新一代的焙烧系统



VITA 比色

VITA 色彩沟通

VITA 色彩再造

VITA 色彩掌控

VITA shade, VITA made. **VITA**

## VITA vPad comfort 舒适触控屏 舒适方便

独一无二是我们的标准

可以控制两台VITA VACUMAT 6000M 烤瓷炉或VITA VACUMAT 6000 MP 铸瓷炉及 VITA ZYRCOMAT 6000 MS 高速结晶炉。允许创建用户个人配置文件来优化工作流程，每个用户都有自己的程序设置，很容易转移到其它触控屏。

这种便利是由于使用了大屏幕彩色触控屏以及结构良好的菜单和符号，保证直观操作，创造了一个舒适友好的工作环境。



例如VITA vPad comfort 舒适控制屏



### 特点与作用

- 可以查看照片的7英寸彩色触摸屏
- 500组可自定义程序
- 可选择不同的焙烧程序包括结晶焙烧
- 可创建四个用户帐户
- USB接口
- VITA vPad，提供所有的监控和服务功能

### 附加功能:

- 自动除水汽和自动清洁功能
- 温度和真空监测
- 节能的夜间模式
- 程序启动后灵活的参数调整
- 设备操作时间和加热元件使用时间的显示
- 简单的存储和管理所有程序、设备和用户数据

### VITA vPad comfort 舒适触控屏

舒适和便利是一大亮点，同时也提高了效率和节省时间。

**VITA vPad comfort 舒适触控屏**是完美的例子。它不仅拥有一个创新的和时髦的设计，也提供了相当大的操作便利。

## VITA New Generation 新一代的焙烧系统用户效益



- **优越的成本效益** “一键式”操作使用户能节省大量时间。
- **定制** 烤瓷炉主机可以选择不锈钢或耐高温漆外观。还可以增加彩色侧面板。每个用户可以根据需要选择合适自己的VITA vPad 触控屏。
- **灵活和面向未来** 焙烧系统可以按照你的需求进行扩展，如结晶、烤瓷、铸瓷。
- **保修和服务** 一年整机保修。
- **高效** 是标准VITA 系统“德国制造”。完美的炉腔保温材料和加热元件的配合使得温度在炉腔内十分均匀并是获得最佳烧结结果的保证。
- **高速烧结**
  - 只需80分钟
  - 多达9个单位的桥体
  - 所有牙科陶瓷材料的烧结（白色及工业化生产或人工预着色的 $ZrO_2$ ）
  - 受控冷却到 $400^{\circ}C$ 的模式下安全/无压力的烧结

## 新一代VITA焙烧系统 个性化宗旨



### 超灵活性和个性集约化的模块化设计结构

具有VITA代表性的时尚与高效率效率的新一代的焙烧系统，最尖端的专家级焙烧系统比其他所能见到的同类设备更具有经济性和操作便捷性。由于创新的模块化结构设计理念，使得用户可以建立起完全满足自己高效需求的焙烧系统。

这款新一代牙科焙烧系统包含VITA VACUMAT 6000M 烤瓷炉、VITA VACUMAT 6000 MP 铸造炉和VITA YZRCOMAT 6000 MS 高速结晶炉；可与之组合的三款触控屏分别是：VITA vPad easy 简易触控屏，VITA vPad comfort 舒适触控屏和VITA vPad excellence 高级触控屏，每款触控屏的设计都是用于满足特定需求的，一个触控屏最多可以操控四个焙烧单元。

用户在任何时间仅需购买所需的模块和配件（主机、触控屏、配件）。这种来自于VITA创新的定制解决方案意味着用户可以按照自己的需求建立起一个高效的焙烧系统，从而确保每种焙烧过程都具有经济效益。

## VITA VACUMAT® 6000 M 烤瓷炉 高附加值是我们标准




### 提供多种效益的焙烧系统

VITA 品质是稳定的。无论你选择哪种触控屏，VITA VACUMAT 6000 M 烤瓷炉都将提供你所期望的结果。这种全自动微处理器控制的焙烧系统可以焙烧所有的牙科陶瓷，它能在确保用户安全与便利的情况下提供一流的具有美学效果高质量的产品，还具有很多新颖的特性以确保最佳的焙烧结果。

### 优化的细节设计

好的设计必须符合用户需求，VITA VACUMAT 6000M 烤瓷炉正是遵循了该理念，符合现代美学和小巧的设计，还可以有时尚的不锈钢或优雅的耐高温漆面板供您选择。它占用的空间非常小，两侧可收缩的冷却托盘能安全放置焙烧件。LED显示棒和可调音讯警报可以让用户在远处察觉设备的工作状态。

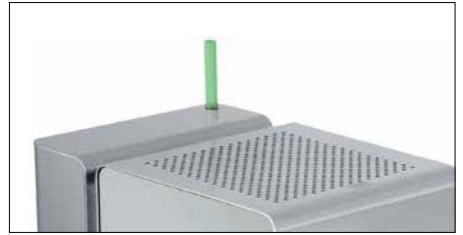

LED显示棒

### 焙烧技术的发展

工艺技术的发展主要目的是进一步简化工作流程，从而提高设备和材料的使用可靠性。

使用VITA VACUMAT 6000 M 烤瓷炉您将获得的收益：

- 创新高科技焙烧技术和高科技的焙烧腔材料使热量分布更均匀
- 经过长时间考验的石英加热管和可靠的电子器件可以保证始终如一的焙烧效果
- 众多监控和便捷及安全的服务功能可以节约大量时间，比如：
  - 避免水汽凝结在炉腔的自动除湿功能
  - 每个程序开始前的温度自动调整功能可以保证温度精度在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
  - 自动清洁功能
  - 受控快速冷却和夜间模式



## VITA VACUMAT® 6000 MP 铸瓷炉 效率是我们的格言



### 烤瓷和铸瓷烧结的完美结合

VITA 公司有别于其他公司的地方就是她始终将客户的需要能有机地统一满足并实现于她的产品特性中，VITA VACUMAT 6000 MP 铸瓷炉即是又一个佐证。这个设备将目前烤瓷和铸瓷烧结的优势集中于一身，而且小巧的整机设计也成了同类产品的新标杆。

VITA VACUMAT 6000 MP 铸瓷炉保留了VITA VACUMAT 6000 MP 烤瓷炉的所有程序设置，也可以实现任意品种铸瓷的烧结工序，并且有支持不同铸造量的铸造腔可选。控制屏会显示需要的铸瓷块颗粒数，由此可以避免过多材料的加入导致铸造腔的损坏。

### 无磨损无故障

得益于VITA铸造技术，该设备使用稳定性强几乎不会在操作上发生差错。VITA VACUMAT 6000 MP 铸瓷炉应用了气体力学，而非常见的机电力学原理，因此可以更加容易得到压铸的压力并且几乎不会发生差错。



重要的加压附件

## VITA ZYRCOMAT® 6000 MS 高速结晶炉 强化的可能性

### 精良的设备

- 快速烧结只需80分钟
- 快速烧结多达9个单位的桥体
- 所有基于氧化锆和氧化铝材料的牙科陶瓷的烧结
- 在受控冷却到400°C的模式下安全/无压力的烧结结晶
- 可选择使用一个VITA vPad 触控屏操作多个结晶炉
- 可选的模块化结构能将设备升级为更具灵活性和高效性
- 紧凑、安静、快速



### 优化的细节设计

VITA ZYRCOMAT 6000 MS 高速结晶炉每一个细节都通过考验，两个可升降冷却盘只是其中之一。这个设备在尺寸上是小的，但功效是大的。VITA ZYRCOMAT 6000 MS 高速结晶炉的烧结腔可以在给定的时间内完成多达25个单元的结晶过程。由于该设备先进的设计和技术含量，使你总能在工作效率上领先一步。

### 声光警示眼见为实

LED显示棒和可调音讯的声音警示可让使用者在远处就能察觉设备的工作状态。设计优化的通风散热系统可以让设备的电子系统始终工作在安全状态下，确保电子系统的高效并可延长使用寿命。

### 最高温度状态下的性能表现


VITA ZYRCOMAT 6000 MS 高速结晶炉采用了高质量的二硅化钼发热元件( $\text{MoSi}_2$ )，使结晶可以高达1600°C，高熔点和抗氧化性能使得它成为高温加热材料的首选。

产品的开发和生产完全在德国，你完全可以信任并选择VITA ZYRCOMAT 6000 MS 高速结晶炉：

- 结晶腔的热量均匀分布
- 全自动校准以确保温度的精准
- 使用寿命的延长和长期的节能运行
- 所有标准材料的烧结，比如白色及工业化生产或人工预染色的二氧化锆在所有模式下都能取得一致和令人信服的效果



独一无二 VITA 3D-MASTER 比色系统,可以有系统的测定和完美的复制天然牙色。

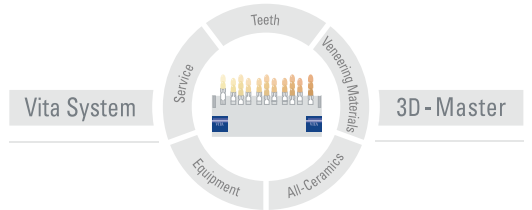

敬请注意:

产品请按操作说明进行操作。否则,恕不承担由此所造成的一切损失。用户在使用本产品前有义务对其应用范围进行进一步确认。如果未按使用要求将本产品与其他材料混合使用,或用其他厂商的仪器进行加工,由此而造成的不适症及损伤,本公司不负任何责任。

对本说明的准确性,我公司所承担的法律責任仅限于改产品本身的价值(见供货单上产品的价格,不包括消费税)。公司不承担由使用本产品而照成的营业额的损失,以及其他直接或间接的损失,以及第三者对买方所提出的赔偿。本公司有责任承担因为故意或严重过失(包括签订协议时的过失、触犯与协议相关的义务、违规运作等过失)所造成的损失。

VITA Zahnfabrik 已获得医药设备产品认证,以下各产品也已获得 CE 认证: **CE**0124。

**tesco 丰达** | **DENTAL SUPPLIES LIMITED**

**香港总公司 (HongKong)**  
丰达牙科器材(香港)有限公司  
地址:香港九龙永康街79号创汇  
国际中心15楼D-F室  
电话:(852)2544 2729  
传真:(852)2854 1582  
<http://cn.tesco-dental.com>

**上海分公司 (Shanghai)**  
电话:(21)6276 0777  
传真:(21)5426 2889

**深圳分公司 (Shenzhen)**  
电话:(755)2675 6440  
传真:(755)2675 5775

**北京分公司 (Beijing)**  
电话:(10)5377 9640  
传真:(10)5377 9642



**VITA**

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-new-generation.com](http://www.vita-new-generation.com)