

ネックサポーター Lite 取扱説明書

取扱いを誤ると事故、故障および破損につながる場合があります。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


商品特長

- 1) 首をリラックスさせる：日常の疲労やストレスからくる首の不快感を和らげ、どんなスタイルにもマッチし、日常に最適です。
- 2) サイズが調整可能：あらゆる体型に合わせて調整可能なデザインで、快適なフィット感を提供します。
- 3) 肌に優しい材質：ポリエステル素材を使用し、肌にやさしく、アレルギーの心配がありません。
- 4) 水洗い可能：カバーを外して洗濯が可能で、清潔さを保つのが簡単です。
- 5) 超軽量デザイン：僅か52gの重さで、持ち運びに便利で快適な使用が可能です。


使用する前に必ずお読みください

- 1) 就寝時は使用しないでください。
- 2) 長時間着用される際は、適度に脱着を行なってください。
- 3) 本来の目的以外での使用はしないでください。
- 4) 本体を水洗いしないでください。
- 5) アレルギー体質の方や、湿疹等の異常が生じた場合、また首の痛みなどで通院されている方、関節炎等首に炎症のある方は医師とご相談ください。

使用説明

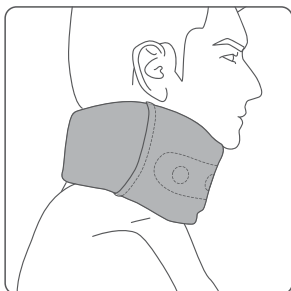

- 1) 後ろのマジックテープでサイズを調整し、首にぴったりフィットするように固定してください。
- 2) 快適なフィット感を維持するため、過度に締め付けないように気をつけてください。
- 3) スマホ使用中に首や肩に負担がかかる場合、姿勢を整えて快適な日常を楽しんでください。

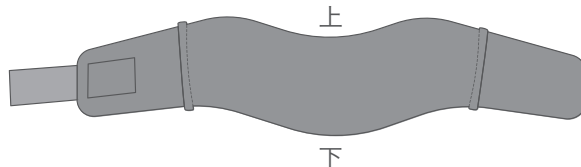

製品仕様

製品名	ネックサポーター Lite
品番	LK028A
シリーズ名	LUDWIG KATRIN
材質	スポンジ ポリエステル素材
製品サイズ	約50×10cm
製品重量	約55g
セット内容	本体×1、専用カバー×1、取扱説明書×1
ロット番号	詳細は化粧箱をご覧ください
バージョン番号	Y-01

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

お手入れ方法

- 1) 表面が汚れている場合は、水を含ませ、固く絞った布で優しく拭き取ってください。
- 2) 高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- 3) 熱又は直射日光を避けて保管してください。
- 4) 本品の上に重い物を置かないでください。

製品に関するお問い合わせ先

住所：〒422-8044
静岡県静岡市駿河区西脇913
Email：support@techlove.jp
お問合せ受付時間：10：00～17：00
(土・日・祝日を除く)



【お問い合わせする】

お買い上げの販売店
 Amazon 楽天 その他 _____
店舗名：
注文番号：