



Tech Love REMO-NECK

TL107A



# 製品紹介

## ● 付属品

① 製品本体×1


② リモコン×1

③ 充電ケーブル×1

④ 取扱説明書×1

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更する場合がございます。  
※本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

## ● 製品紹介

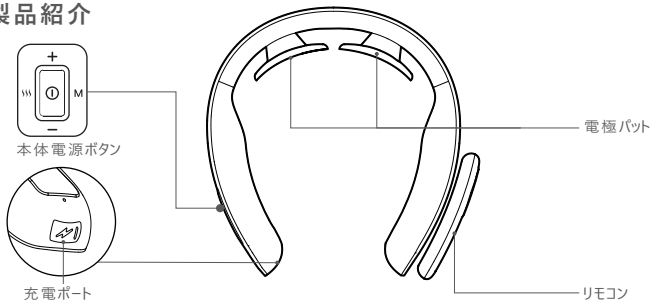

# 安全上のご注意を必ずお守りください

## ● 注意事項

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万が一、異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、お客様相談センターへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。



**警告**

次のような機器とは、絶対に併用しないでください。

- ① ペースメーカーなどの体内植込み型機器
- ② 人工心肺などの生命維持用の機器
- ③ 心電計などの装着型機器



## 安全上のご注意を必ずお守りください



### 警告

- ❗ 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を使用する際には、頸部および頭部の金属、アクセサリー類を外して使用してください。  
強いショックを受ける恐れがあります。
- ❗ 連続使用時間は15分を超えないでください。長い時間の使用により、低温やけどや肌のトラブルの原因になります。
- ❗ 本製品を分解、改造しないでください。故障や事故の原因になります。
- ❗ ご使用中に体の不調や肌のトラブルが起きた場合には、直ちにご使用を中止し、医師にご相談ください。
- ❗ 使用中に本体の位置を変える場合は、まず電源をオフしてから位置を変えてください。  
強いショックを受ける恐れがあります。
- ❗ お風呂など、高温多湿の場所では使用しないでください。強いショックや故障の原因となります。
- ❗ 急に動作が停止した場合は、直ちに電源を切って、首から外してください。すぐに、販売店までにご連絡ください。

## 安全上のご注意を必ずお守りください



### 警告

- ❶ 本体からUSB充電コードを外す際には、コードの先端を持ってから、外してください。
- ❷ 本体およびUSB充電コードを水につけたり、水洗いしないでください。感電やショートによる火災などの原因になります。
- ❸ USB充電コードが傷んだり、差込口がゆるいときは使用しないでください。USBコードを破損・加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せ無理な扱いをしたり、はさんだりしないでください。感電やショートによる火災などの原因になります。
- ❹ 不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしないでください。けがや本体が故障する原因となります。
- ❺ 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。破損・発火の原因になります。
- ❻ USB充電コード本体の差込口部分に液体、金属類、異物、ほこりを付着させないでください。感電やショートの原因になります。

## 安全上のご注意を必ずお守りください



### 警告

- ⊗ 運転中、睡眠時、飲酒後には使用しないでください。思いがけない事故やけがにつながる恐れがあります。  
車内でのご使用は、休憩中など運転中以外でご使用ください。
- ⊗ 就寝時に、本製品を使用しないでください。
- ⊗ 使用しないときは必ず電源を切り、長時間の充電を避けてください。火災・故障の原因になります。
- ⊗ ドライヤーやファンヒーターなどで、本体や付属品を乾燥させないでください。部品の変形、故障の原因になります。
- ⊗ 収納時にUSB充電コードを本体などに巻き付けしないでください。  
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
- ⊗ USB充電コードは付属品を使用してください。また、他の製品には使用しないでください。  
故障や事故の原因になります。

# 安全上のご注意を必ずお守りください



## 警告

### ● 次の人及び次の場合は使用をお控えください

次の人は当製品を使用しないでください

- 1 悪性腫瘍のある方
- 2 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 3 自らの意思表示、伝達ができない方
- 4 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性の皮膚炎、敏感肌の方
- 5 薬を服用中の方
- 6 発熱が（38℃以上）している方
- 7 乳幼児、お年寄りのなど、熱さを自覚できない方
- 8 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 9 肌に傷や湿疹、腫れものがある方
- 10 体調不良や身体に異常を感じている方
- 11 心臓疾患のある方、血栓のある方
- 12 医療機関で治療中の方
- 13 むち打ち症、頸椎損傷、脊管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性痛のある方
- 14 安静を必要とする方
- 15 骨折、整形などで、顔面や首、頸椎に埋め込み手術を受けた方
- 16 性感染症のある方
- 17 妊娠中の方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください）
- 18 首や頸椎の病気のある方またはあった方
- 19 脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
- 20 医師からマッサージを禁じられている方



## 製品機能・注意事項

### ● 製品機能




### ● 充電時の注意事項

- ❶ 充電中には本体の電源をオフにしてください。
- ❷ 出力が5V=1AのACアダプタのみご使用いただけます。  
その他は使用しないでください。
- ❸ 充電時は、充電表示ランプが赤色、充電が完了すると緑色に点灯します。
- ❹ 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所は避けてください。
- ❺ 充電しながら使用しないでください。
- ❻ リモコンのボタン電池を交換する際は、電池カバーの溝部分にコインを挿し込み、反時計回りにカバーを外して電池の交換を行ってください(ボタン電池タイプ：CR2032 3V)。電池の正極が上に向くようご注意ください。

# ご使用方法

## ● リモコンガイド

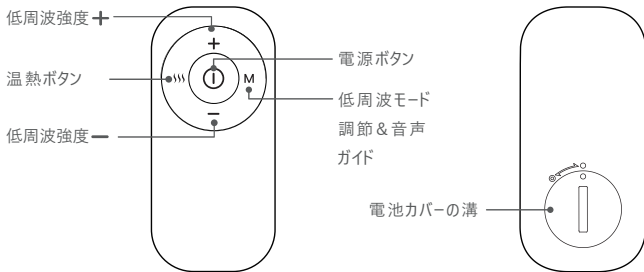

# ご使用方法

## ● リモコンガイド



電源ボタン

### 電源ボタン

- 長押しすると、電源がオン／オフになります。
- 製品の稼働時間は初期設定で15分に設定されており、時間になると自動で電源をオフにします。



温熱ボタン

### 温熱ボタン

- 稼働状態で温度の調節ができます。音声ガイドで「ヒート高め→ヒートオフ→ヒート低め→ヒート高め（順）」をお知らせします。



強度ボタン

### 強度調節ボタン

- 起動時は強さレベル1となり、16段階の強さ調節が可能です。  
レベル1が最も弱く、レベル16が最も強いです。



モードボタン

### モードボタン

- 起動時は「自動組み合わせモード」となり、全部で5種類の動作モードに切り替えることができます。

# ご使用方法

## ● ご使用方法

- ① 首に装着する。(装着方法：首の後ろの適切な位置に合わせ、適度な力で本製品のアーム部分を引っ張り、首に部分電極パットが密着するように装着します)  
※ 首のまわりを、水などで十分に湿らしてから、本体を装着してください。  
※ 電極パットを皮膚にぴったりとフィットするように装着してください。
- ② 装着してから電源ボタンを押し、リモコンを利用して好みのモードに設定します。
- ③ 本体の「**①**」を長押しすると、電源がオンになります。音声ガイドでは「ご利用頂き、ありがとうございます。モード1」とお知らせします。また、ランプも点灯します。
- ④ 電源がオンの状態で、「**①**」を長押しすると、電源がオフになります。  
電源オフになると、音声ガイドで「ご利用ありがとうございます」とお知らせします。
- ⑤ スイッチがオンの状態で、「**〰〰〰**」ボタンを短押しすると、温度調節ができます。  
音声ガイドでは「加熱高レベル→加熱停止→加熱低レベル→加熱高レベル（順）」とお知らせします。

# ご使用方法

## ● ご使用方法

- ⑥ 「**M**」ボタンを短押しすると、お好みのモードに設定できます。音声ガイドでは「モード1から5まで」を繰り返してお知らせします。
- モード1：組み合わせモード  
モード2  
モード3  
モード4  
モード5
- ⑦ モードを変更すると、EMSレベル1に戻ります。
- ⑧ 「**M**」を長押しすると、音声ガイドでは「音声ガイドオン／オフ」とお知らせします。  
音声ガイドをオフにし、サイレントモードでご使用できます。
- ⑨ 「**+** / **-**」を短押しすると、強さは16段階まで調節できます。音声ガイドで強さをお知らせします。  
例：レベル3の場合、レベル3とお知らせします。  
1以下に設定すると、EMSがオフとなります。

# ご使用方法

## ● ご使用方法

- ⑩ 「 — 」を長押しすると、EMSがオフとなります。また、音声ガイドでもお知らせします。
- ⑪ 省エネのため、製品は電源を入れたまま2分間装着しないと、電源オフになります。

注意：

本体の電源を切った後、2分間以内であれば、リモコンを使って本体を再起動することができます。なお2分間以内にリモコン操作がなかった場合、本体は休眠モードに移行します。再びご使用の際は、「①」長押しして本体を起動してください。長時間使用していない場合、本体の「①」を押して製品の起動後、リモコンの操作が可能となります。

# お手入れ

## ● お手入れ・保管方法

- 1 本製品を使用しないときは、製品を安全なところに保管し、製品の上に物を乗せないでください。
- 2 長期間使用しないときは、本体の掃除をしてから保管してください。
- 3 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 4 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿な場所を避けて、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 5 腐食性のある洗剤で掃除しないで下さい(褪色、ヒビが入る原因となる為)。
- 6 当製品を他の目的で使用しないで下さい。
- 7 長期間本製品を使用しない場合は、本体をフル充電してから保管してください。  
また、定期的に本製品を動作させ、再度充電してください。

# お手入れ

## ● お手入れ方法

- 1、本体は清潔に保ってご使用下さい。破損や汚れの原因となります。
- 2、お手入れする前に、必ず電源を切って下さい。
- 3、柔らかい布や柔らかいスポンジを使って拭き取って下さい。製品は濡れないようにして下さい。
- 4、お手入れする際、水や他の液体を製品に浸透させないで下さい。感電や短絡（ショート）の恐れがあります。
- 5、家具用研磨剤、ブラシ、ガソリン、灯油、ガラス、または腐食の危険がある洗剤は使用しないでください。

## ● 運輸

環境温度：-20°C～+50°C

相対湿度：≤90%

運輸：製品に簡易な防振装置が取り付けられており、航空、鉄道、車両、船による運輸が可能。

運輸中は雨・雪、衝突を避け、逆さにしないでください。

## ● 廃棄処理について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# お手入れ

## ● 点検・処置

本製品使用中に下記のような問題が発生した際には、下記内容をご確認ください。

問題	考えられる原因と処置
製品が正常に動作しない	充電残量不足。本体を充電してください
	電源ボタンを押していない
充電できない/充電ランプが点灯しない	アダプター・USB充電ケーブルが接続されているか否かをお確かめください
表示ランプが点灯しているがEMSを感じない	温熱パットが皮膚にピッタリと当たっているか否かをお確かめください
	温熱パットと皮膚の間に髪や服が挟まれているか否かをお確かめください
	動作の強さを強くしてください

# お手入れ

## ● 点検・処置

本製品使用中に下記のような問題が発生した際には、下記内容をご確認ください。

問題	考えられる原因と処置
痛みを感じる	ご使用時間が長すぎます。一回15分、一日に2回までを限度として使用してください。
	動作の強さを弱くしてください
	気温が低く、皮膚が乾燥している。濡れた布で皮膚を濡らしてから使用してください 傷口があります。治るまでは使用しないでください。 アレルギーの可能性がございます。直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

# お手入れ

## ● 点検・処置

本製品使用中に下記のような問題が発生した際には、下記内容をご確認ください。

問題	考えられる原因と処置
強さが弱く感じた際は	電極パットと首が完全密着していない 首に完全密着するように位置を調整し、強さを弱いレベルから順に高めてください
	電極パットに汚れやごみなどが付着している 電極パット表面をきれいにふき取ってください
	バッテリー残量不足。充電してください。
	強さレベルが低い。強さを弱いレベルより順に上げて、適切な強さに調整してください

注意：

対処後なお異常がある場合、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。自分で分解・修理をしないでください。

# 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明のため、保証対象外となります。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理もしくは交換いたします。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
3. 保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
  - ①使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。
  - ②お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
  - ③地震、火災、水害、その他天災による故障や破損。
  - ④外力による本体の変形や変色。
  - ⑤消耗品の消耗による交換。
4. 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

# 保証書

製品名称／品番	Tech Love REMO-NECK TL107A
無料修理保証期間	お買い上げ日 年 月 日 より12ヶ月間

お客様

お名前:

ご住所:

お電話番号:

製品に対するお問合せ先

発売元・住所・TEL

極楽鳥製薬株式会社

東京都足立区千住宮元町12-12

TEL.03-6822-3536

お問合せ受付時間 : 10:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

取扱販売店 住所・電話番号

## 製品仕様

製品名称	Tech Love REMO-NECK
品番	TL107A
定格電源	5V $\equiv$ 1A
定格電圧	3.7V $\equiv$
消費電力	4.4W
電池の容量	1200mAh
サイズ	約145×149×40mm
正味重量	約177 g
稼働時間	15min/回
発売元	極楽鳥製薬株式会社
ロット番号	ラベルを参照してください
バージョン番号	J-02

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

※ 本製品は、医療機器ではありません



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます

SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING

取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管してください

Please read the manual carefully before using and properly keep for later queries