

VELPEAU® 维力健
快速恢复 就用维力健



胸腰椎
固定器
VP0401



【产品名称】：胸腰椎支具（胸腰椎固定器）
【型号规格】：VP0401

【产品信息】：

规格	产品编码	颜色	适用范围
均码	VP0401	灰	适用于成人/青少年等不同人群

【成分】：
涤纶, 聚氨酯, 锦纶, PP, POM, 玻璃纤维, PVC, 不锈钢, 硅胶, 聚乙烯, PU等组成。

【产品性能】：
·产品不含金属配件（除充气球阀外），佩戴过程可进入电子计算机断层扫描仪（俗称CT）或核磁共振仪（俗称MRI）。
·卡扣式固定装置，随手机松开固定，穿戴过程无需使用专业工具。
·滑轨式绑带设计，横向、纵向尺寸可调节，操作简单，可覆盖男女老幼不同人群。
·腰部气囊设计，增加佩戴的舒适性和稳定性。

【适用症状】：
·胸腰椎体及软组织损伤术后外固定。
·胸腰椎体骨性损伤保守治疗时的外固定。
·胸腰椎体及其软组织损伤康复治疗过程中早期站立运动防护。

【禁忌症】：
·创伤处如有皮肤溃破者慎用，或进行包扎避免直接接触。
·该装置用于单个患者。

www.velpeau.cn

【副作用】：
·在概率很小的情况下会发生皮肤刺激和过敏。

【使用方法】：

·请在医生或专业人员指导下使用。
·可佩戴进入电子计算机断层扫描仪或核磁共振仪（俗称CT或MRI），但注意要取下充气阀（整个产品唯一的金属配件）。
·使用前请检查本产品各部件是否牢固，固定时必须牢固，如发现有问题请及时维修或更换。
·无须借助任何工具即可完成产品塑料主体部分的宽度和高度调节，双卡扣设计，使调节更加方便快捷、牢固稳定。
·请按照使用方法正确佩戴，如穿戴错误可能引起骨骼畸形。
·建议穿戴不要过紧或过松，过紧会影响血液循环，不利于伤口恢复，过松起不到固定作用。
·穿戴完成之后，可以对气囊充气（气囊为非必须使用的辅助配件，具体充气程度以个人实际情况为准，不建议完全充满）。
·使用时如出现不适，请停止使用并及时就医。

【注意事项】：

·使用前请仔细阅读说明书或遵医嘱。
·如使用过程中产生不适，可调节松紧度。
·使用前或后用清水清洗，置于常温通风干燥处晾晒即可，可重复使用。

【储存和运输条件】：

允许适用一般交通工具运输，常温储存，但须做到防火、防潮、防尘、防震、防虫。


www.velpeau.cn

【产品部件展示】：




正面

www.velpeau.cn

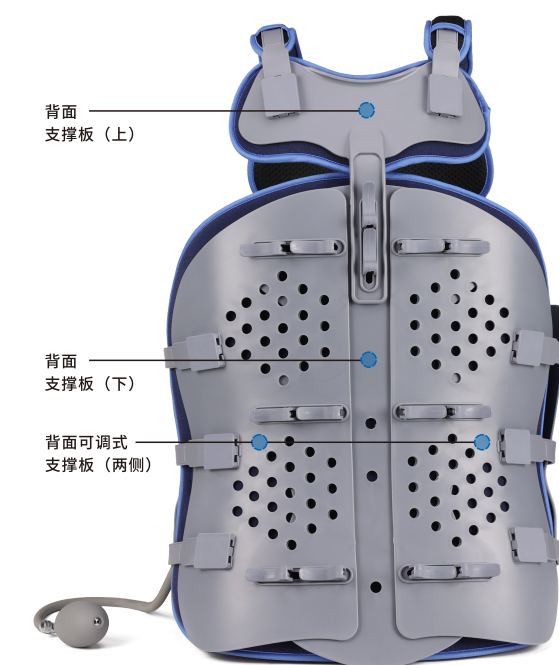

背面

www.velpeau.cn

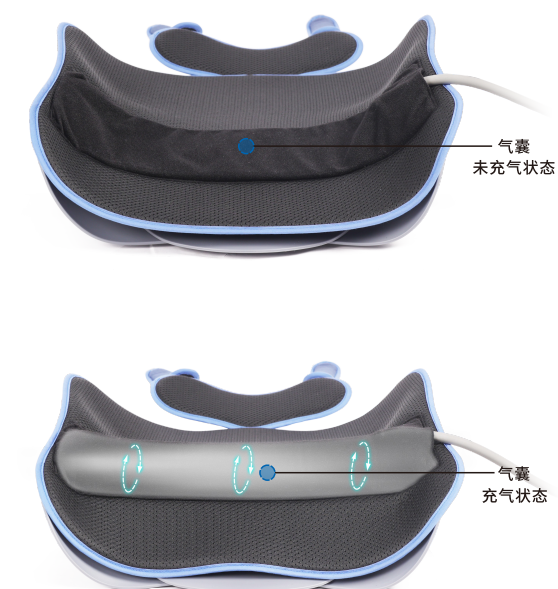

⚠️ 气囊为非必须使用的辅助配件，具体充气程度以个人实际情况为准，不建议完全充满。

www.velpeau.cn

VELPEAU® 维力健
快速恢复 就用维力健




【产品备案号】：粤深械备20230433
【生产备案凭证号】：粤深食药监械生产备20150081号



深圳市维力健科技制品有限公司
Shenzhen Weprotech Technology Product Co., Ltd
ADD: 深圳龙岗区坂田街道坂田社区天安云谷产业园二期11栋11710
TEL: 0755-89505533 E-mail: sales88@velpeau.com
www.velpeau.cn
EC REP: No. 38, Boulevard Renard Benoit, 78690 Epone, France



【适用不同体型的人群】：

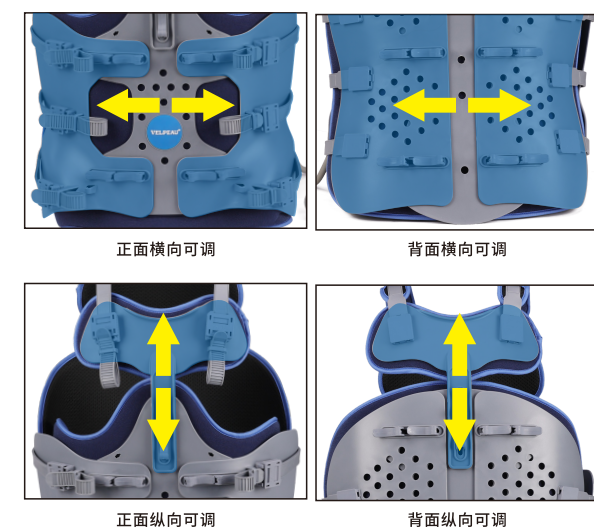

卡扣设计



整个产品的绑带系统均采用卡扣设计，一推即锁，一拉即开，轻松便捷，固定牢固。

www.velpeau.cn

【安装与穿戴步骤】：



www.velpeau.cn



www.velpeau.cn



www.velpeau.cn

【支具大小调节方法】：




www.velpeau.cn



www.velpeau.cn



【产品维护和保养方法】：

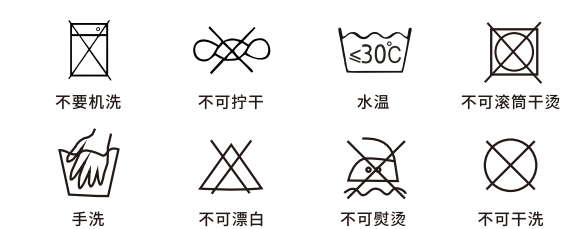

【生产日期】：见包装
【有效期】：5年
【备案人名称】：深圳市维力健科技制品有限公司
【备案人地址】：深圳龙岗区坂田街道坂田社区天安云谷产业园二期（02-08地块）11栋11710
【备案人联系方式】：0755-89505533
【生产企业名称】：深圳市维力健科技制品有限公司
【生产地址】：深圳龙岗区坂田街道坂田社区天安云谷产业园二期（02-08地块）11栋11710
【生产企业联系方式】：0755-89505533
【生产备案凭证号】：20150081
【售后服务单位】：深圳市维力健科技制品有限公司
【售后服务地址】：深圳龙岗区坂田街道坂田社区天安云谷产业园二期（02-08地块）11栋11710
【邮编】：518129 【联系电话】：0755-89505533 【邮箱】：sales88@velpeau.com
【网址】：www.velpeau.cn 【编制日期】：2023-05-23 【修改日期】：2023-05-23

www.velpeau.cn